

# Bone Wave



## 骨ウェーブ

手首測定タイプ

Live Aid Co.,Ltd.  
http://www.live-aid.co.jp

### 測定手順


- ① スタートボタンを押して下さい。
- ② 性別と年齢を入力して、「次へ」を押して下さい。

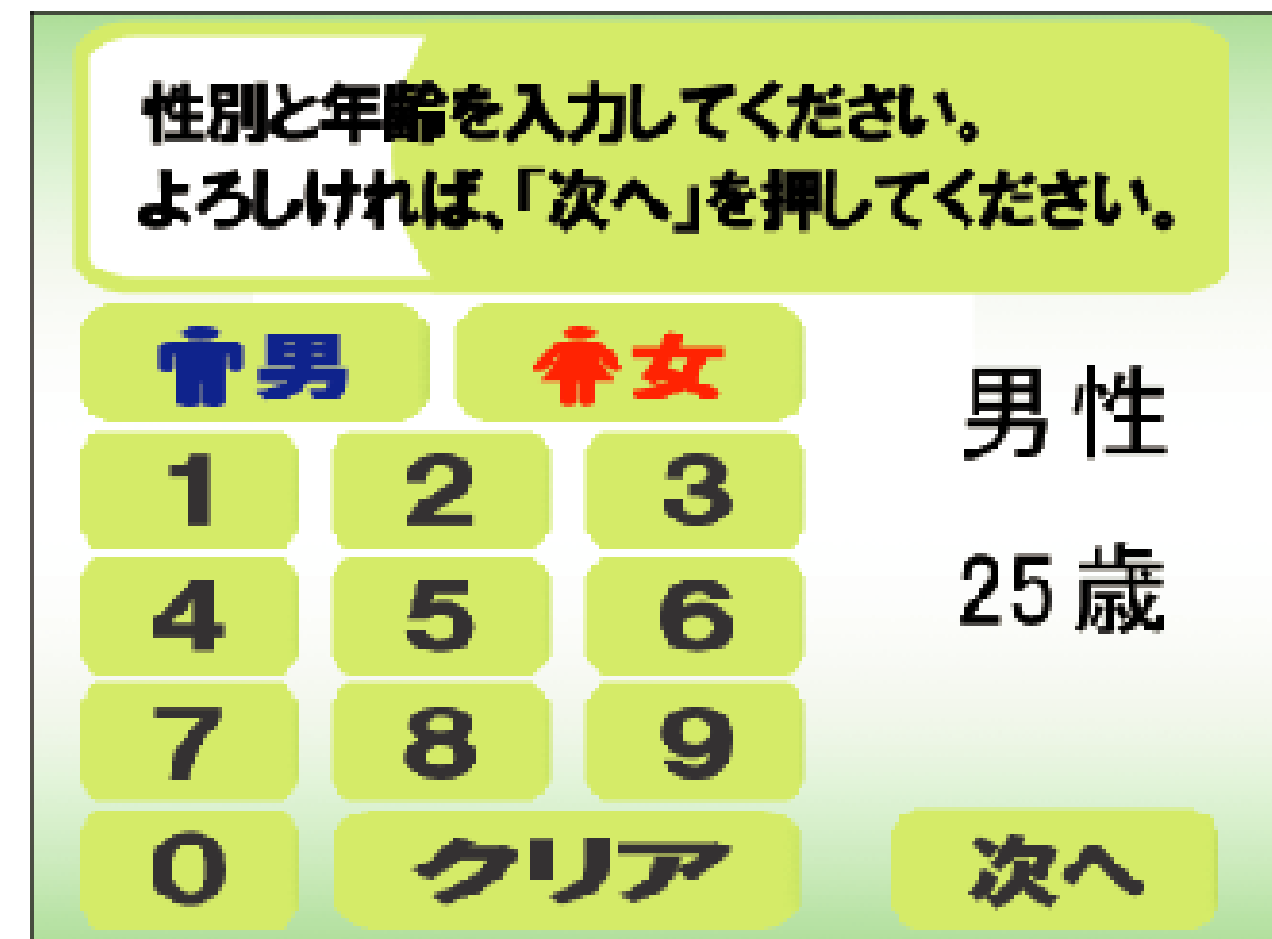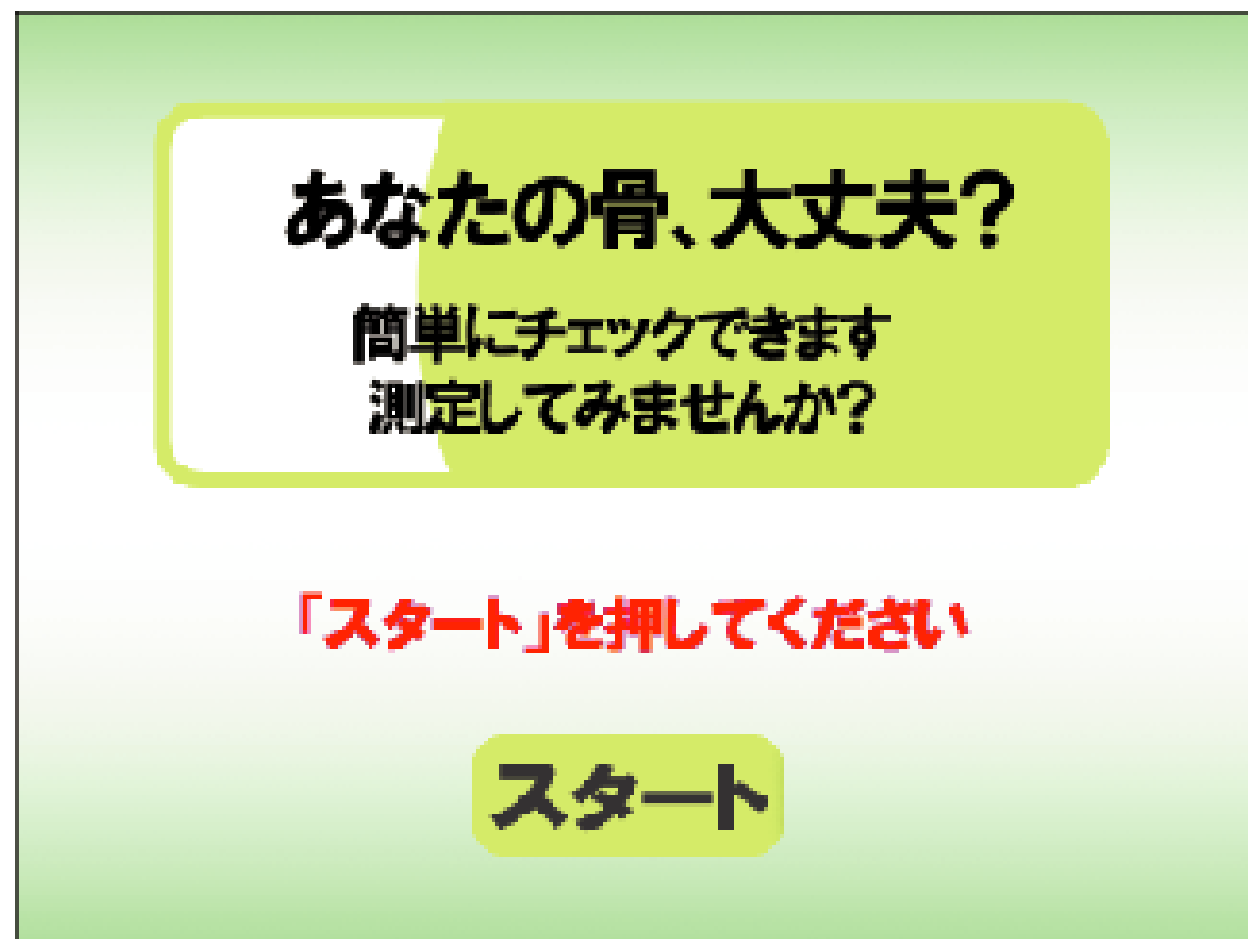

- ③ 手首の両側に音響スプレーを十分に吹き付けて下さい(もしくは音響ゼリーを塗布して下さい)。(音響スプレーを十分に吹き付けないと、測定できない場合があります。また、バルーンが破損する場合があります。)
- ④ 手でバーを握り、手を下ろすようにして、手首をバルーンの間に入れて下さい。



- ⑤ 「次へ」を押すと、測定が開始されます。
- ⑥ 測定が終了すると、結果が表示及び印刷されます。

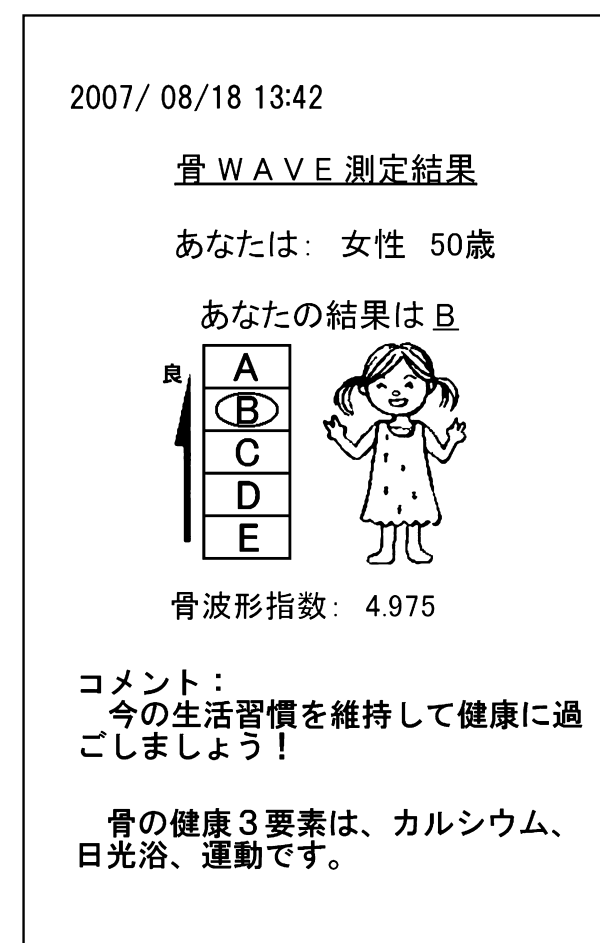

※測定が失敗した場合は、もう一度十分に音響スプレーを吹き付け、再度、測定手順4から繰り返して下さい。