

# DF データ管理ソフト 1.0

DF データ管理ソフト rev.1.0 - [測定]

平成19年9月3日月曜日 サンプル さん

基本情報を入力します  
●2回目以降の方は、前回の値を自動的に表示します  
前回測定日は 平成19年8月11日 です

データNO 1173 ※自動で2桁表示します。

測定者 サンプル 様

身長 175 cm  
ウエスト 65 cm  
生年月日 昭和 - 50 - 5 - 2 -  
年齢 32 才 10~の歳まで測定が可能です  
性別 男性  
OT測定値 cm<sup>2</sup>  
着衣補正量 1.5 kg

測定開始  
自動的に測定結果を表示

**BODY CHECK**

体重 66.80 kg

右腕  
脂肪率 18.0%  
筋肉量 1.40 kg  
筋肉率 43.2%

左腕  
脂肪率 16.0%  
筋肉量 1.20 kg  
筋肉率 43.4%

右脚  
脂肪率 21.3%  
筋肉量 5.40 kg  
筋肉率 50.7%

左脚  
脂肪率 20.5%  
筋肉量 4.40 kg  
筋肉率 52.2%

測定履歴

測定日	評価
2007/08/11	94
2007/08/09	95
2007/08/07	95
2007/08/05	95
2007/08/03	95
2007/08/01	95

評価(点数) **95** 点

● 身体全体の測定結果 ●

BMI 22.7	体脂肪率 18.0%	筋肉量 22.30 kg
内臓脂肪指数 45	基礎代謝量 1555 kcal	推定骨量 2.60 kg
水分量 33.70 kg	基礎代謝基準 1220 kcal	

● 腕と脚のレベル判定結果 ●

右腕 脂肪率 標準	左腕 脂肪率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準
右腕 筋肉率 標準	左腕 筋肉率 標準

印刷する パスワードを設定する 過去の履歴を見る 点数表示 閉じる

Body check sheet 体組成測定結果

測定日 2007/08/11 性別 男性 身長 175 cm  
測定者 サンプル 様 年齢 32 才 着衣量 1.5 kg

全身チェック

測定結果	判定結果	前回測定結果	前回判定結果
体重 66.4 kg	低い 標準 高い	66.8	
ウエスト 65 cm		65	
OT測定値 cm			
BMI 22.4 kg/m <sup>2</sup>	低体重	22.7	低体重
体脂肪率 18%	非肥満	18	非肥満
内臓脂肪指数 45	非肥満	45	非肥満
筋肉量 22.3 kg		22.3	
水分量 33.2 kg		33.7	
推定骨量 2.7 kg		2.6	
基礎代謝量 1550 kcal	高い	1555	やや高い

右腕  
脂肪率 10.0% 低い  
筋肉量 1.5 kg  
筋肉率 48.5% やや高い

左腕  
脂肪率 16.4% 低い  
筋肉量 1.4 kg  
筋肉率 48.8% やや高い

右脚  
脂肪率 21% 標準  
筋肉量 4.8 kg  
筋肉率 55.6% やや高い

左脚  
脂肪率 20.3% 低い  
筋肉量 4.6 kg  
筋肉率 56.7% やや高い

基礎代謝  
脂肪率 11.9% 脂肪量 17.4 kg 脂肪率 41.9% 脂肪量 51.9 kg  
筋肉量 15 kg 筋肉率 55%

測定履歴

測定日	BMI	体脂肪率	体重量
2007/08/11	22.4	18%	66.4
2007/08/09	22.7	18%	66.8
2007/08/07	22.5	18%	66.2
2007/08/05	22	18%	65.3
2007/08/03	22.4	18%	66.3
2007/08/01	22.3	18%	66.5

コメント

※ 貴社の基準値以上に  
測定値を詳細に  
表示する機能があります。

評価(点数) **94** 点

DF データ管理ソフト rev.1.0 - [履歴]

平成19年9月3日月曜日 サンプル 様

グラフ表示項目を選択します  
※ マウスでドラッグ、又は、ダブルクリックします。

表示項目候補  
体脂肪率 腕脂肪率 脚脂肪率 体脂肪率 腕脂肪率 脚脂肪率 体脂肪率 腕脂肪率 脚脂肪率 体脂肪率 腕脂肪率 脚脂肪率 体脂肪率 腕脂肪率 脚脂肪率

選択項目  
体重量 BMI

グラフ更新

グラフ種類 折れ線(2D)

※ リストをドラッグすると、管理画面からのコメントが現れます。

※ グラフが更新されない場合はグラフ更新ボタンをクリックしてください。

測定履歴

測定日	体重量	BMI	体脂肪率	腕脂肪率	脚脂肪率	体脂肪率	腕脂肪率	脚脂肪率
2007/08/11	66.4	22.4	18%	18%	18%	18%	18%	18%
2007/08/09	66.8	22.7	18%	18%	18%	18%	18%	18%
2007/08/07	66.5	22.5	18%	18%	18%	18%	18%	18%
2007/08/05	65.5	22	18%	18%	18%	18%	18%	18%
2007/08/03	66.3	22.4	18%	18%	18%	18%	18%	18%
2007/08/01	66	22.3	18%	18%	18%	18%	18%	18%

体組成計での測定値を  
統合的に画面管理

測定値リストはビジュアルに  
優れた表現力

過去測定値の一括入力  
が可能





# DF データ管理ソフト 1.0

## ● 体組成計での測定値を統合的に画面管理

- DF850 DF851 DF860で測定した結果をパソコンに取り込み保存するため、過去履歴を含めた測定結果のデータ一元管理が可能。
- 測定結果を身体部位にあてはめて表現していますので、各部位の脂肪率、筋肉量、筋肉率が一目わかります。
- 測定結果を当社基準により算定した点数にて表示することが可能。客観的、総合的な測定結果の判断材料とすることができます。
- 過去履歴の表示、グラフ化も、ボタンひとつで表示可能。各種表示(測定)項目、グラフ種類も選択でき、印刷もできます。

- ① 各部位の測定結果
- ② 身体全体の測定結果

## ● 測定値リストはビジュアルに優れた表現力

- DF850 DF851 DF860で測定した結果を、測定直後の内容と前回測定時の内容を比較することができます。
- 過去直近20回の測定内容をグラフにて確認することができます。
- リスト中、身体各部位(右腕、右足、左腕、左足)に測定値を配置し、さらに、基準値を下部に設けることで、自身の測定結果と標準値の比較が簡単におこなえます。
- 過去からの測定推移が一目で確認でき、また、コメント欄を設けていますので、指導、対策にも効果的です。

- ③ 今回測定結果
- ④ 前回測定結果
- ⑤ 各部位の測定結果
- ⑥ 基準値
- ⑦ 過去測定値グラフ
- ⑧ コメント欄

## ● 過去測定値の一括入力が可能

- DF850 DF851 DF860で既に測定・ロール紙保存をしている場合、過去履歴の登録画面より一括登録が可能です。これにより、当ソフト導入以前のデータも、当ソフトにて管理することが可能です。

## ● その他の機能

- 測定値に対するコメントのテンプレート化が可能。同じコメント入力の手間が激減し、効率よく、効果的なコメントが発行できます。
- ユーザー(測定者)の削除、非表示などを管理画面でおこなえます。
- 管理者画面にて顧客管理機能が利用できます。お客さまの管理にご利用ください。



## ● 付属品

- RS232Cケーブル(インタリンク/クロス)

## ● DF データ管理ソフト1.0 動作環境

対象ハードウェア (各OSの推奨値に準拠します)	Pentium®800MHz以上(Pentium® III 800MHz以上を推奨)のプロセッサを搭載したPC/AT互換機 ・メモリ:246MB以上 ・ディスプレイ:1024 X 768ピクセル以上 ・ディスク容量:2GB以上の空き容量を推奨 ・その他:インストール時にCD-ROMドライブが必要 ※体組成計とPCとの接続については、「DFデータ管理ソフト 操作マニュアル」の「はじめに」項(1ページ)を参照
オペレーティングシステム(OS)	Microsoft® Windows® 2000 日本語版(ServicePack4以上) Microsoft® Windows® XP 日本語版(ServicePack 1以上) Microsoft® Windows® Vista 日本語版 対応予定

- Pentiumは、米国およびその他の国における、Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名または商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- 商品の仕様、外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インクの性格上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

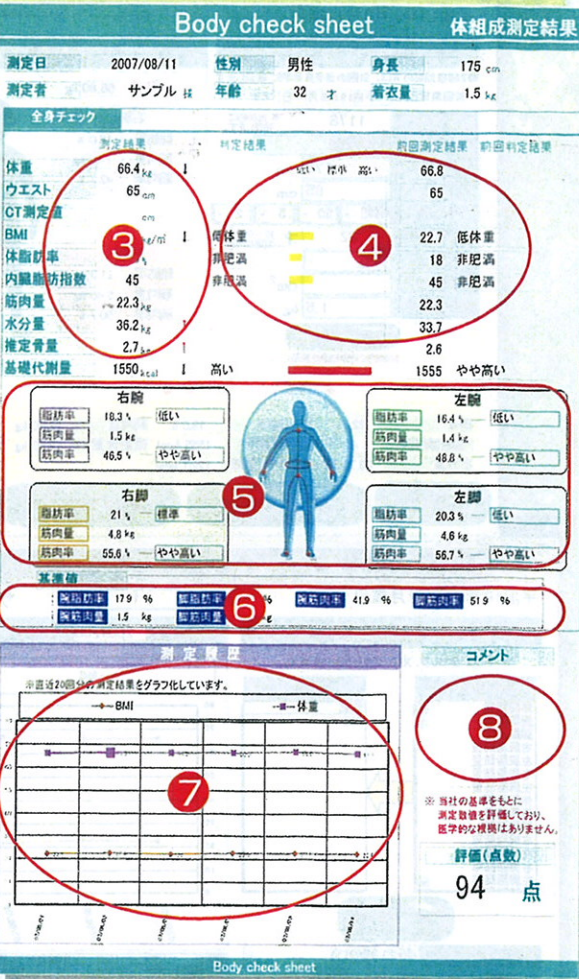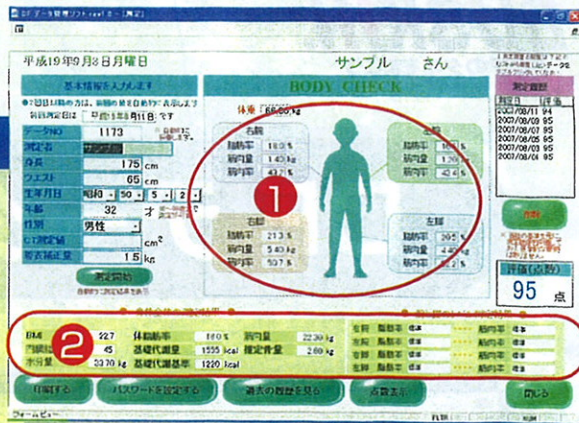

代理店(お問い合わせ・ご用命は下記まで)

発売元



株式会社 ダスキンヘルスケア